




onda

## ¿Listo para adoptarla?

La revolución de la remodelación corporal

Onda destaca en los sectores de la **estética, dermatología** y **remodelación corporal**

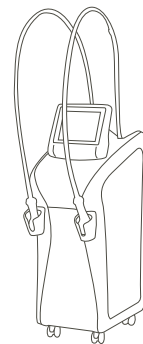

**DEKA**  
Innate Ability

**DEKA**  
Innate Ability

## Beneficios rápidos de ONDA:

Grasa localizada | Celulitis | Flacidez cutánea

### Principios clave


ONDA de DEKA incorpora la exclusiva tecnología patentada **Coolwaves®**.

Coolwaves® son microondas especiales que se concentran selectivamente en las células de grasa para reducir los depósitos de grasa localizada de una manera segura, eficaz y no invasiva.

### Coolwaves® es imperdible para:

#### Grasa localizada

Destruye profundamente las membranas de las **células de grasa subcutánea**. El lisado residual se drena posteriormente mediante procesos metabólicos fisiológicos.

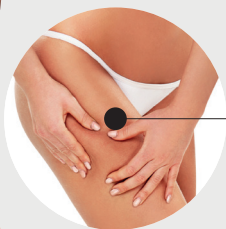

#### Celulitis

Actúa en el **tejido conectivo** entre los **lóbulos adiposos** de la celulitis.

#### Tensado de la piel

La contracción inmediata de las fibras de colágeno de la dermis y la estimulación de la producción de nuevo colágeno hacen **que los tejidos se compacten y se tonifiquen**.

DEKA



LA CIENCIA SUBYACENTE

## Concentrar la energía solo donde se necesita

Las **piezas de mano inteligentes** patentadas por DEKA de un vistazo:

**NEW!**

Piezas de mano ergonómicas diseñadas para optimizar la eficacia y la manipulación

Indicador del control de emisiones

Botón de inicio del tratamiento

Pieza de mano ergonómica





## Acción controlada

Las piezas de mano están diseñadas especialmente para emitir **Coolwaves®** de una manera controlada, que permite concentrar la energía exclusivamente en las zonas donde se requiera (tejido adiposo subcutáneo) y **proteger el tejido circundante**.

## Varias profundidades de acción para diferentes usos

Las dos piezas de mano **Deep** y **Shallow** difieren en su profundidad de acción; cada una ha sido diseñada para **diferentes zonas corporales** (abdomen, rodillas, caderas, nalgas, brazos, papada) o tipos de imperfecciones.



### Profunda (Deep)

Lo mejor para la grasa localizada (**acción a 1,2 cm de profundidad**)




### Superficial (Shallow)

Lo mejor para la **Celulitis** | **Flacidez cutánea** | **Grasa submentoniana**  
(acción a 0,7 cm de profundidad) - ¡Nuevo!

## Sistema de enfriamiento integrado

Las piezas de mano tienen incorporado un sistema de enfriamiento cutáneo por contacto que contrarresta el calor emitido por las microondas. **La dermis superficial se mantiene protegida para asegurar el confort absoluto del paciente** a evitar cualquier efecto secundario o inflamación.

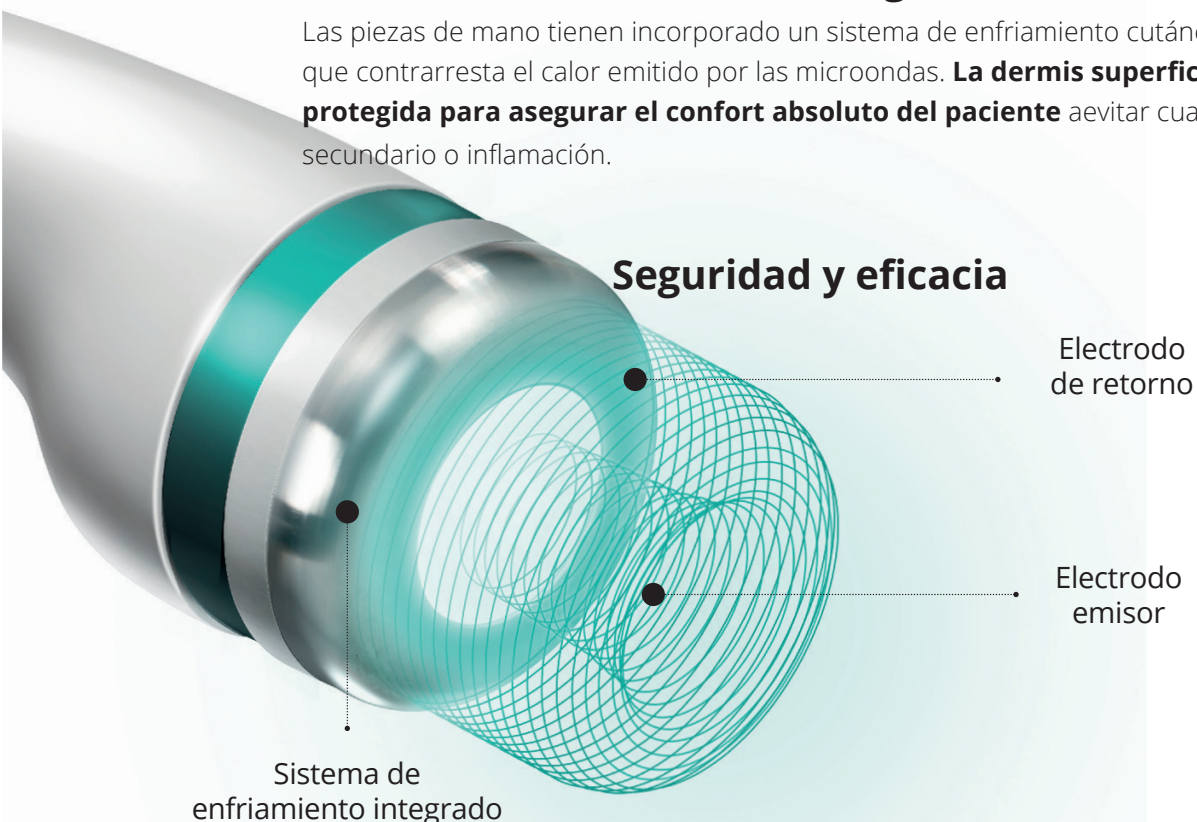


LA CIENCIA SUBYACENTE

## Se concentra selectivamente a las células de grasa

No daña la superficie de la piel

ONDA **Coolwaves®** actúa en profundidad sin dañar la dermis circundante: **de hecho, las microondas de 2,45 GHz son absorbidas principalmente por las células grasas**, mientras que la energía de radiofrecuencia se dispersa mucho más en la superficie de la piel (dermis y epidermis).

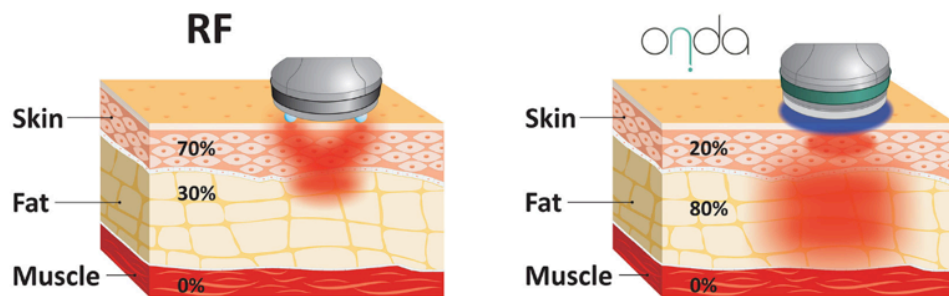


**80%**



Energía de **Coolwaves®** que se concentra **en las células adiposas.**

La mayor parte de la energía aplicada penetra en la grasa.

**20%**

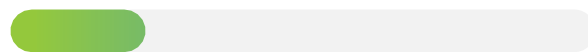

**Energía que causa el efecto secundario térmico superficial.**

Únicamente el 20% de la energía llega a la dermis (el calor generado se contrarresta mediante un sistema de enfriamiento).



## Resultados clínicos



**Grasa localizada y celuliti**  
Concesión de Benedetta Salsi,  
Doctora en Medicina,  
*Reggio Emilia - Italia*



**Grasa localizada y flacidez**  
Concesión de Ciprian Constantin  
Flueras, Dr. en Medicina.  
*Clinica de belleza antiedad,  
Brasov - Rumania*



**Grasa localizada y flacidez**  
Concesión de Benedetta Salsi,  
Doctora en Medicina,  
*Reggio Emilia - Italia*



**Grasa localizada (papada)**  
Concesión de Benedetta Salsi,  
Doctora en Medicina,  
*Reggio Emilia - Italia*



## Conocer a nuestra audiencia y mercado

El **mercado** de la remodelación del cuerpo, el estiramiento de la piel y la reducción de la celulitis ha **aumentado de manera constante en los últimos 10 años**, supported by the gracias al lanzamiento de tecnologías no quirúrgicas y tratamientos más seguros orientados al logro de objetivos terapéuticos específicos.

### Mercado mundial de la remodelación corporal y el estiramiento cutáneo\*



**+1.4 millones**  
**SUPERADO EN 2019**



**12.7%**  
**CRECIMIENTO ANUAL**  
previsto hasta 2023

\*Fuente: Medical Insight, Inc.



## Opinión de los profesionales sanitarios

“ Pude ver una buena respuesta en mis pacientes tratados con Onda. Generalmente comenzaba por áreas pequeñas y luego los mismos pacientes, al ver los resultados, pedían seguir con otras áreas del cuerpo.

**Dr. Daniele Galimberti**, Doctor en Medicina, Hospital Italiano  
*Buenos Aires, Argentina*

“ Siempre he acogido con agrado las nuevas tecnologías y métodos clínicos pero, al mismo tiempo, prestando atención a las soluciones tecnológicas destinadas a proteger a los pacientes. La eficacia de las microondas me sorprendió especialmente en el tratamiento de la celulitis, un objetivo a menudo difícil de tratar. ¡Con Onda obtuve resultados increíbles!

**Prof. Nicola Zerbinati**, Doctor en Medicina, Universidad de Insubria  
*Varese, Italia*



### Últimas publicaciones científicas obtenidas por ONDA

**Eficacia de las microondas en el tratamiento de la celulitis: un estudio preliminar**

*Prof. A. Di Pietro et al*

**Microondas en la remodelación corporal: Un estudio prospectivo**

*Prof. P. Bonan et al.*

**Nuevo sistema de emisión de energía por microondas o inducción de la reducción de la grasa subcutánea:**

**Prueba histológica y ultraestructural in vivo**

*Prof. N. Zerbinati et al.*



LA COMBINACIÓN PERFECTA

## Ventajas de ONDA

- **Miles de pacientes** tratados en en todo el mundo
- **Excelente retorno de la inversión**
- Gran éxito en más de **35 países**
- **2 premios** como mejor tecnología innovadora
- Más de **90% de pacientes satisfechos**
- **Tratamiento rápido** menos de 10 minutos por zona
- **3 tratamientos en 1**  
Grasa | Celulitis | Estiramiento cutáneo
- **Seguridad y eficacia**



**Exclusivamente para usuarios de DEKA:**

una extraordinaria asistencia en la consulta médica

**DEKA** Club

DEKA



Descubra ONDA  
en acción



# Especificaciones técnicas

ONDA	
Fuente	Microwaves - Coolwaves®
Frecuencia	2.45 GHz
Potencia	Hasta 200 W
Piezas de mano inteligentes	Deep - Shallow
Enfriamiento de la pieza de mano	Sistema patentado de enfriamiento integrado
Control de emisiones	Interruptor dactilar
Base de datos	Incluye tutorial con protocolos de tratamiento
Dimensiones y peso	110 (Al.) x 40 (An.) x 70 (D.) cm   60 kg
Alimentación	100-240 Vca - 50/60 Hz - 1500 VA

**PRECAUCIÓN** - Radiación láser visible e invisible. Evite la exposición de la piel o los ojos a la radiación directa o difundida. Producto con láser de clase 4. Este folleto no está destinado al mercado de los EE.UU.

CE  
0123

onda

**DEKA**  
Innate Ability



Sello del distribuidor



**DEKA M.E.L.A. s.r.l.**

Via Baldanzese,17 - 50041 Calenzano (FI) - Italia  
Tel. +39 055 8874942 - Fax +39 055 8832884

#### Capacidad innata de DEKA

DEKA, una empresa derivada del Grupo El.En., es líder global en el diseño y fabricación de láseres y fuentes de luz para aplicaciones en el ámbito de la medicina. DEKA comercializa sus dispositivos en más de 80 países a través de una amplia red de distribuidores internacionales y oficinas directas en Italia, Francia, Japón y EE.UU. La excelencia es el sello distintivo de la experiencia y el reconocimiento acumulados por DEKA en el ámbito de I+D tras más de treinta años de actividad. La calidad, la innovación y la excelencia tecnológica colocan a DEKA y sus productos en un lugar único y diferenciado en la escena global. DEKA fabrica dispositivos láser de conformidad con las especificaciones de la Directiva 93/42/EEC y su sistema de control de calidad cumple los requisitos de las normas ISO 9001 e ISO 13485.